

Omni Ring App 使用說明書

Omni Ring App Instruction Manual

指環配對

1 下載 iNAP LAB+ APP



iNAP LAB+ 4+
iNAP Lab (inap+oximeter)
Somnics, Inc.
專為 iPhone 設計
★★★★★ 5.0 • 7 則評分
免費



2 第一次使用(Android)



1. 詳閱隱私權政策並按下接受



2. 允許藍芽連線存取所在位置



3. 允許資料記錄儲存在位置



4. 允許拍攝相片及錄製影片

2 第一次使用 (IOS)



1. 允許存取所在位置



2. 允許藍芽連線APP裝置



3. 詳閱隱私權政策並按下接受

3 註冊



1. 選擇使用Apple ID/Google/Facebook快速登入或註冊新帳號

2. 完成後即可進入APP主畫面

4 連接裝置



1. 點選主頁中的裝置



2. 進入裝置列表，點選
下方+號新增裝置



3. 選擇左列Oximeter，
下滑點選Omni Ring

5 指環配對



1. 點選搜尋裝置



2. 將指環靠近手機，搖晃進行配對



3. 配對成功後，裝置會顯示在APP列表上

6 刪除指環配對



1. 點選裝置列表



2. 左滑裝置即可刪除

Omni Ring App 使用說明書

Omni Ring App Instruction Manual

選擇模式

1 選擇模式



1. 指環配對成功後，會顯示在裝置列表中



一般模式：可偵測即時血氧濃度
睡眠模式：可長時間偵測睡眠血氧濃度、心率並生成睡眠報告

2. 有一般/睡眠兩種模式可選擇

2 睡眠模式



1. 點選主頁的Start按鈕，也可開啟睡眠模式



2. 睡眠模式即啟動後
可右滑下方箭頭處停止記錄

3 閱讀報告



1. 點選主頁 或 底部選單的報告，即可觀看生成報告



2. 點選右上角條列圖示可檢視更多歷史紀錄



Omni Ring App 使用說明書

Omni Ring App Instruction Manual

其他設定

1 個人資訊

您可以編輯和個人化您在帳戶上的資訊，包含增加照片、生日、性別、身高及體重。



1. 點選底部選單 > 更多



2. 選擇主選單 > 個人資訊



3. 按右上角編輯即可修改資訊

2 教學

觀看快速指引與教學影片，讓您更快熟悉使用方式



1. 點選底部選單 > 更多



2. 選擇主選單 > 教學



3. 選擇左列Oximeter，
下滑點選OMNI Ring
即可觀看使用教學

3 上傳

您可以編輯和個人化您在帳戶上的資訊，包含增加照片、生日、性別、身高及體重。



1. 點選底部選單 > 更多



2. 選擇主選單 > 上傳



3. 可得知裝置資料上傳狀態

4 關於



1. 點選底部選單 > 更多



2. 選擇主選單 > 關於



3. 可得知公司資訊及 APP 版本

5 隱私權



1. 點選底部選單 > 更多



2. 選擇主選單 > 隱私權



3. 可得知詳細隱私權政策


6 法律宣告



1. 點選底部選單 > 更多



2. 選擇主選單 > 法律宣告

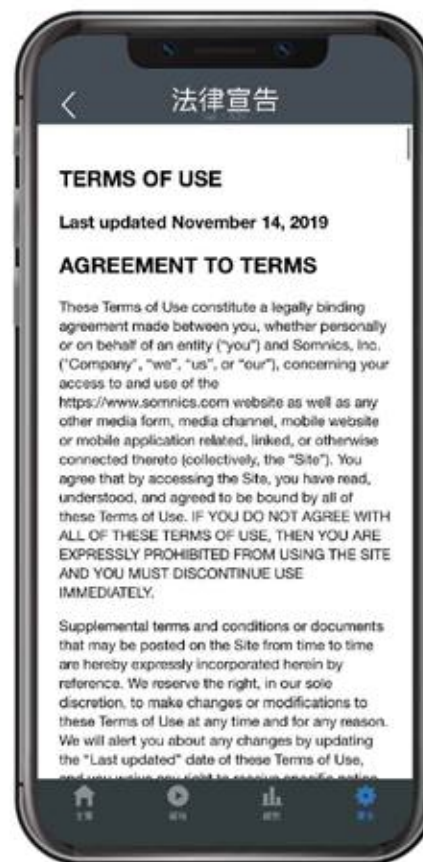

3. 可觀看APP法律宣告